

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

#### MANUTENZIONE

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Smaltimento:** non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.



Conservare in ambiente secco  
Conservare lontano da fonti di calore

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.



Rev. 5 - 03/22

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it  
f @ in



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

**STRUTTURA**

- soft in tessuto Phylo® traspirante, rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo
- completamente apribile (per PHY-72A)
- SNODO/ASTE
- pollicentrico con regolazione mediante stop

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- in schiuma di poliuretano a forma di mezzaluna, orientabile a 360° (con sistema a strappo per PHY-72, nessuno per PHY-72A)

**CHIUSURA**

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

**NOTE**

- il materale è stato oggetto di trattamento termoregolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**MISURE**

Taglie	Ø Coscia
XXL	65-74 cm
XL	57-65 cm
L	51-57 cm
M	45-51 cm
S	37-45 cm
XS	31-37 cm

ALTEZZA 34 cm

34 cm

**Codece d'ordine:** PHY-72A  
PHY-72

Orthopedic & Rehabilitation Equipment

FGP

PHYLO® 72  
PHYLO® 72 A

Ginocchiera traspirante armata aperta e non con snodo policentrico regolabile



- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. creme in caso di applicazioni asettate o di completo assorbimento).

#### AVVERTENZE D'USO

**DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

**INDICAZIONI PHYLO® 72:** modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non; trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale; ed estiti distorsioni di ginocchio; traumi della rotula, lieve e moderata artrosi femoro-rotulea; lussazione rotulea cronica e non; ipertensione rotulea grave; instabilità post traumatica.


**INDICAZIONI PHYLO® 72 A:** modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non; trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale; trattamento distorsioni di ginocchio; gonartrosi lieve e moderata; instabilità post traumatica; esiti distorsione ginocchio.

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o dal tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

# ISTRUZIONI PER L'USO


## PHYLO® 72

1. Aprite i nastri a strappo e poi la ginocchiera. Sedetevi su una sedia e piegate la gamba in modo che formi un angolo di 45°. Fate scorrere l'ortesi lungo la gamba (fig. 1).
2. Posizionate il tutore in modo che il foro rotuleo sia posizionato esattamente sulla rotula.
3. Fissate infine la chiusura a strappo inferiore A (fig. 2) e poi quella superiore B (fig. 3).

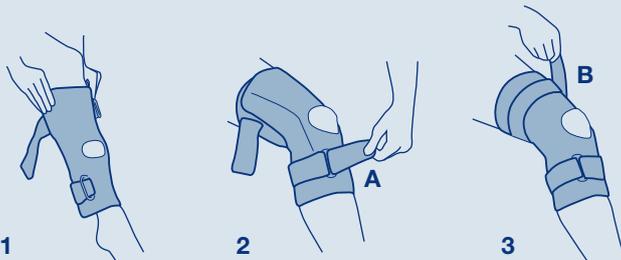

## PHYLO® 72 A

1. Aprite i nastri a strappo e poi la ginocchiera. Sedetevi su una sedia e piegate la gamba in modo che formi un angolo di 45°.
2. Avvolgete la gamba con l'ortesi e chiudete le due chiusure a strappo frontali (fig. 1).
3. Il tutore è posizionato in modo che il foro rotuleo sia esattamente sulla rotula.
4. Fissate la chiusura a strappo inf. A (fig. 2) e poi quella sup. B (fig. 3).

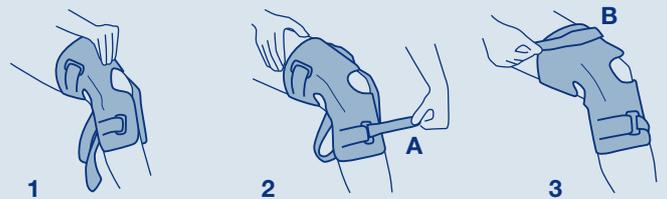

## NOTE IMPORTANTI

Cambiate o modificate i limiti di estensione o di flessione solo su istruzione del vostro medico o tecnico ortopedico.

### Assicuratevi inoltre della corretta posizione dell'ortesi:

le parti centrali dello snodo devono trovarsi all'altezza della parte superiore della rotula, lo snodo deve essere posizionato dietro la linea mediana laterale della gamba.

## PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Regolazione della flessione-estensione dello snodo.

### Inseri di limitazione dell'estensione

(grigi: limiti dell'estensione):

0°, 10°, 20°, 30°, 45°.

### Inseri di limitazione della flessione

(neri: limite della flessione):

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.

### Possibilità di immobilizzazione totale a:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°.




## ISTRUZIONI

Per cambiare gli inserti, rimuovere gli snodi laterali della ginocchiera, allentare le viti degli inserti e piegare delicatamente lo snodo ed estrarre gli inserti.

Gli inserti di estensione sono marcati **EXT** con l'indicazione dei rispettivi gradi. Posizionare l'inserto, spingere il nuovo inserto d'estensione tra le due placche e fissare con le viti.

Scegliere gli inserti di flessione marcati **FLEX** con l'indicazione dei rispettivi gradi. Posizionare l'inserto, spingere il nuovo inserto d'estensione tra le due placche e fissare con le viti.

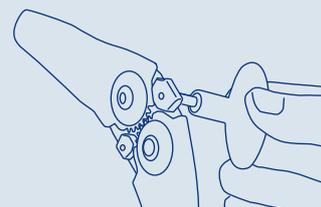

Piegare e flettere lo snodo un paio di volte e controllare che gli inserti siano posizionati correttamente.